

## Инструкция по эксплуатации гласперленового (шарикового) стерилизатора ST– 500

Для профессионального и домашнего использования

### Общие сведения

Гласперленовый (шариковый) стерилизатор предназначен для стерилизации маникюрных и парикмахеских инструментов (рис.1). Оснащен терморегулятором с разогревом и индикатором отключения. Стерилизатор разогревается до 250 °С и отключается автоматически. Как только начинает падать температура, регулятор включается снова и разогревает до 250 °С.

В комплекте: запасные стеклянные шарики (рис.2).



рис.1



рис.2

Модель	ST-500
Артикул	100481
Рабочее напряжение	220-240 В ~ 50-60 Гц
Потребляемая мощность не более	100 Вт
Габариты Д/Ш/В	160/160/110 мм
Материал корпуса	Сверхпрочный пластик
Время разогрева до 250 °С	20-30 мин
Температура стерилизации	250 °С
Терморегулятор	Разогрев, индикатор отключения
Вес	500г

### Метод использования:

1. Вставьте вилку в розетку;
2. Установите аппарат на устойчивую поверхность, откройте крышку, загрузите шарики;

3. При помощи регулятора установите режим «вкл» (рис.3), после чего должен загореться индикатор, который показывает начало разогрева;
4. Закройте крышку аппарата на 20-30 минут, дождитесь полного разогрева стерилизатора. Определить степень нагревания можно по индикатору: как только лампочка отключится, приступайте к процедуре;
5. Откройте крышку, поместите инструмент рабочей частью в шарики;
6. Стерилизуйте в течение 5-15 секунд;
7. После проведения процедуры стерилизации, нажмите кнопку «выкл», отключите аппарат от сети и закройте крышку.



рис. 3



рис. 4

### Меры предосторожности:

1. Для уверенного и безопасного использования, полностью прочтите инструкцию по эксплуатации перед процедурой стерилизации;
2. Хранить в прохладном, сухом месте, избегать попадания прямых солнечных лучей, близости нагреваемых элементов;
3. Не мочить, избегать попадания воды внутрь оборудования;
4. Не используйте, если есть повреждения корпуса или шнура питания;
5. Не трогайте пальцами шарики или контейнер, чтобы не обжечься;
6. Беречь от детей;
7. НИКОГДА не перемещайте и не переворачивайте аппарат, если в стерилизаторе есть шарики;
9. Никогда не включайте стерилизатор, если в нем нет шариков;
10. К стерилизации допускается инструмент, изготовленный из жаропрочных металлов, в противном случае Вы рискуете их деформировать или затупить;
11. Не помещайте инструмент в стерилизатор, если он: пластиковый, деревянный, мокрый;
12. Прежде чем использовать стерилизатор, Вам необходимо тщательно обработать детали инструментов щеточкой;
13. Не забывайте извлечь инструменты в точно назначенное время – передержав их в стерилизаторе, Вы рискуете их повредить;
14. Не накрывайте стерилизатор, чтобы не помешать циркуляции воздуха;
15. Всегда отключайте кабель питания после окончания процедуры стерилизации.